






Le ortesi EPITACT® GIORNO e NOTTE sono lavabili in lavatrice a 40° all'interno del sacchetto di lavaggio fornito con il prodotto. Le ottime finiture della gamma ortesi garantiscono una lunga durata dei prodotti (diversi mesi d'utilizzo). Venduti all'unità, disponibili in tre taglie, esistono nella versione per la mano destra e per la mano sinistra.

#### QUADRO DI TAGLIE

 VENDUTO singolo	Misurate la circonferenza del vostro polso. (Se avete dubbi tra 2 taglie scegliete la più piccola)		
	S 13 ≤  ≤ 15 cm	M 15 <  ≤ 17 cm	L 17 <  ≤ 19 cm
CODICE ORTESI FLESSIBILE DI GIORNO ✨			
MANO DESTRA	925497986	925498014	925498038
MANO SINISTRA	925497998	925498026	925498040
CODICE ORTESI RIGIDA DI NOTTE ☾			
MANO DESTRA	970576260	970576284	970576308
MANO SINISTRA	970576272	970576296	970576310



Chiedete consiglio al vostro farmacista.  
In Farmacia ed in Ortopedia

[www.epitact.it](http://www.epitact.it)

Sono Dispositivi Medici C.E. - Leggere attentamente le avvertenze interne e le istruzioni per l'uso.

**DISTRIBUTORE PER L'ITALIA: QUALIFARMA S.R.L.**

Via Dante Alighieri n. 41 - 29014 Castell'Arquato (PC) Italia - [info@qualifarma.it](mailto:info@qualifarma.it)

 ZA Champgrand - BP 64 - 26270 LORIOL - Fax : 04 75 85 02 17  
[www.milletinnovation.com](http://www.milletinnovation.com) - Email : [info@milletinnovation.com](mailto:info@milletinnovation.com) **INNOVAZIONE** 



## POLLICE DOLORANTE RIZOARTROSI



**VISTO  
allaTV**






# CHE COS'È LA RIZOARTROSI?



La rizoartrosi è un'artrosi delle articolazioni alla base del pollice (articolazione trapeziometacarpale). La rizoartrosi colpisce principalmente le donne dopo i 50 anni e solitamente inizia sulla mano dominante ma possono essere colpite entrambe le mani. I fattori genetici, la menopausa o la ripetizione di certi gesti sembrano favorire la sua comparsa. Un'aggravamento provoca dolorosi attacchi infiammatori e conduce gradualmente all'irrigidimento e alla deformazione del pollice. Poco a poco diventa impossibile afferrare un oggetto tra il pollice e l'indice o le altre dita. L'ortesi EPITACT® mantiene il pollice in posizione di riposo riducendo le forze che si esercitano sull'articolazione. Dona sollievo dal dolore e limita anche l'evoluzione della rizoartrosi.

## ORTESI FLESSIBILE GIORNO ☀


Indossare quotidianamente l'ortesi flessibile giorno EPITACT® aiuta a donare sollievo dai dolori articolari alla base del pollice. Flessibile, fine e discreta, permette di conservare l'intera funzionalità della mano.

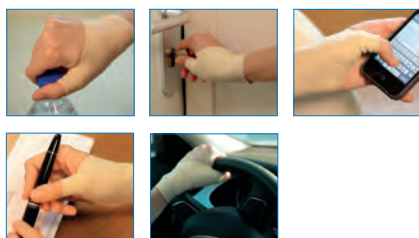

**ERGONOMIA ADATTA AI GESTI DEL QUOTIDIANO**  
L'ortesi propriocettiva flessibile non è composta da nessun elemento aggressivo che rischierebbe di danneggiare gli indumenti. Sottile e discreta, essa vi permette di continuare ad indossare il vostro orologio e i vostri gioielli.

## ORTESI RIGIDA NOTTE 🌙

Indossando l'ortesi rigida EPITACT® di notte aiuta a donare sollievo dai dolori articolari notturni alla base del pollice. Molto confortevole, leggera ed ultra fine, non si percepisce durante il sonno.

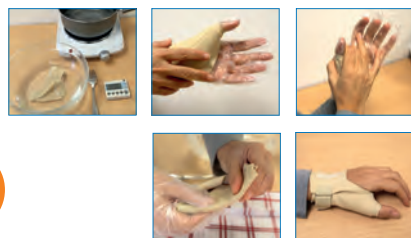

**ORTESI TERMOFORMABILE SU MISURA**  
L'Ortesi rigida prende la forma della vostra mano posizionandola in modo naturale con il pollice a riposo: disporrete così anche di un'ortesi confortevole ed efficace.

**INDOSSARE GIORNO**

**FUNZIONAMENTO DELL'ORTESI FLESSIBILE GIORNO \***

**MANTIENE IL POLLICE IN POSIZIONE DI RIPOSO**  
Allineando le ossa del pollice, l'ortesi limita le forze che si esercitano sull'articolazione e dona sollievo dal dolore.

**LIMITA I MOVIMENTI TRAUMATIZZANTI**  
Mantenendo il pollice senza immobilizzarlo, l'ortesi aiuta ad assorbire i movimenti traumatizzanti e limita anche gli attacchi infiammatori dolorosi.



**INDOSSARE NOTTE**

**FUNZIONAMENTO DELL'ORTESI RIGIDA NOTTE 🌙**

**SENZA ORTESI POLLICE DOLORANTE**

**ARTICOLAZIONE TRAPEZIO-METACARPALE**

**ORTESI BREVETTATA TERMOFORMABILE POLLICE IN POSIZIONE DI RIPOSO**

**Rinforzo su misura termofornabile**




\*Modella facilmente la tua ortesi prima dell'uso: Con l'aiuto delle istruzioni di termofornatura incluse nel pack o seguendo il tutorial di spiegazione su [www.epitact.it](http://www.epitact.it)

# MASSIMA EFFICACIA

Queste due ortesi sono complementari : donano sollievo dal dolore e limitano l'evoluzione della rizoartrosi. Senza immobilizzare, l'ortesi flessibile giorno va ad assorbire le micro mobilizzazioni traumatizzanti all'origine dei dolori. La notte, l'ortesi rigida su misura va a mantenere naturalmente il vostro pollice in posizione di riposo e preserva il vostro dormire.